

Graviditetstest

Hurtig Påvisning

- Mere end 99 % præcis fra dagen for din forventede menstruation.
- **Læs denne brugsanvisning nøje igennem, læs du gennemfører en test.**

1 Før du går i gang

Det kan være praktisk at have et ur i nærheden, når du tager testen.

Du kan teste når som helst på dagen fra dagen for din forventede menstruation.



2 Udfør testen

Når du er klar til at teste, skal du fjerne folieindpakningen og tage hættten af. Brug prøvepinden med det samme.

Du kan tage testen direkte i urinstrømmen **eller** i en urinprøve, som er indsamlet i en ren og tør beholder.

- Hold farveændringsspidsen, så den peger nedad i urinstrømmen, **eller** dyp den i den indsamlede urinprøve i **5 sekunder, som vist på billedet.**
- Farveændringsspidsen vil omgående blive lysere, hvilket viser, at urinen absorberes. **Du skal blive ved med at holde farveændringsspidsen nede i urinen, indtil der er gået 5 sekunder.**

- Fortsæt med at holde farveændringsspidsen, så den peger nedad, eller læg prøvepinden fladt ned, indtil du er klar til at se resultatet, og der kommer en blå streg til syne i kontrolvinduets.



- Du kan evt. sætte hættten på igen.
- Hvis farveændringsspidsen ikke bliver helt lysere, skal du se S5.



VENT I 3 MINUTTER. Når testen er i gang, vil du se blå streger komme til syne.

3 Aflæs dit resultat


Du kan nu aflæse dit resultat i resultatvinduets.

En blå linje skal være til stede i kontrolvinduets, når du aflæser dit resultat. Denne linje viser, at testen har virket.

Resultatet 'Gravid' kan blive vist efter 1 minut, når du tester fra den dag, du ikke fik din menstruation (som er dagen efter din forventede menstruation).

Du bør vente, til de 3 minutter er gået, for at bekræfte et 'Ikke gravid'-resultat (se S8).

Hvis du ikke ser en blå linje i kontrolvinduets, virkede testen ikke (se S6).

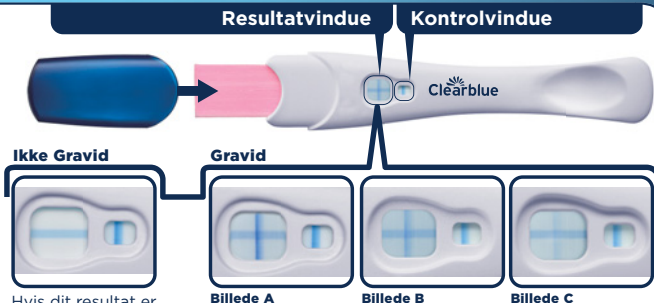

Hvis dit resultat er **'Ikke Gravid'**, skal du se S10.

- Hvis dit resultat er **'Gravid'**, skal du se S11.
- Hvis du stadig ikke er sikker på dit resultat, skal du se S7.

Det er ligegyldigt, om en af linjerne, som udgør '+'-symbolet er lysere eller mørkere end den anden; resultatet er 'Gravid'.

VIGTIGT! Aflæs dit resultat inden for **10 minutter** efter gennemførelse af en test. Ignorer eventuelle ændringer af dit resultat efter dette tidspunkt.

Spørgsmål og svar

- Hvor præcis er Clearblue?**

Laboratorietests har vist, at Clearblue er mere end 99 % nøjagtig, når den bruges fra dagen for din forventede menstruation.
- Howdan fungerer Clearblue?**

Når du er gravid, producerer din krop graviditetshormonet hCG (humant choriongonadotropin). Mængden af hCG i din krop stiger i de tidlige stadier af graviditeten. Clearblue Urin Påvisning kan påvise meget små mængder af dette hormon i din urin (tekstens følsomhed er 25 mIU/ml).
- Jeg er ikke sikker på, hvornår min næste menstruation er forventet. Hvordan ved jeg, at jeg tager testen på det rigtige tidspunkt?**

For at regne ud, hvornår din forventede menstruation er, skal du beregne din normale cykluslængde ved at tælle antallet af dage fra menstruationens første dag indtil dagen, for din næste menstruation starter.

 - Hvis du har en uregelmæssig cyklus, skal du beregne ud fra den længste cyklus, som du har haft i månederne op til, at testen tages.

Hvis resultatet er 'Ikke gravid', og du stadig mistænker graviditet, skal du se S10.
- Kan medicin eller medicinske tilstande påvirke resultatet?**

Hvis du tager medicin, skal du altid læse fabrikantens anvisninger, **før** du foretager testen.

 - Fertilitetsmedicin, der indeholder hCG, kan føre til misvisende resultater (denne fertilitetsmedicin gives som regel som injektion, og tests for tæt på indgivelse kan give et fejlagtigt resultat som 'Gravid').
 - Anden fertilitetsbehandling (såsom clomifencitrat), smertestillende medicin og hormonelle præventionsmidler (f.eks. p-piller) bør ikke påvirke resultatet.
 - Hvis du for nyligt er ophørt med at bruge hormonelle præventionsmidler eller modtager fertilitetsbehandling som clomifencitrat, kan dine menstruationer blive uregelmæssige, hvilket fører til, at du foretager testen for tidligt.
 - Hvis du for nyligt har været gravid (selvom graviditeten blev afbrudt), kan resultatet fejlagtigt blive 'Gravid'.
 - Ektopisk graviditet, ovariecyster, overgangsalder og nogle meget sjældne sygdomme kan føre til misvisende resultater.
 - Hvis du får et 'Gravid'-resultat, er det muligt, at du senere finder ud af, at du ikke er gravid pga. et naturligt tab, hvilket kan forekomme i de tidlige stadier af graviditet.

Hvis du får uventede resultater, bør du kontakte din læge.
- Jeg har brugt graviditetstesten, men farveændringsspidsen er ikke blevet helt lyserød. Hvad skal jeg gøre?**

Hvis farveændringsspidsen ikke er blevet helt lyserød, kan det skyldes, at du ikke har fugtet den med en tilstrækkelig mængde urin. Hvis der imidlertid kommer en blå linje til syne i kontrolvinduet inden for 10 minutter efter at have foretaget testen, har testen virket korrekt. Hvis der ikke fremkommer nogen blå linje i kontrolvinduet inden for 10 minutter efter at have foretaget testen, skal du se S6.
- Jeg har brugt graviditetstesten, men der kommer ikke en blå linje til syne i kontrolvinduet. Hvad skal jeg gøre?**

Hvis der ikke er kommet en blå linje til syne i kontrolvinduet inden for 10 minutter efter at have foretaget testen, har testen ikke virket. Dette kan skyldes, at:

- Farveændringsspidsen ikke blev holdt nedad, eller at prøvenden ikke blev lagt fladt ned efter at være blevet fugtet med urin.
 - Der blev brugt for meget eller for lidt urin.
- Farveændringsspidsen skal holdes i urinstrømmen/urinprøven i 5 sekunder.**
- Du bør tage testen igen med en ny prøvende og følge anvisningerne. Du kan eventuelt indsamle din urin i en ren, tør beholder og kun dyppe farveændringsspidsen ind i den i 5 sekunder.
- Hvad hvis jeg er i tvivl om mit resultat?**
 - For at dit resultat er 'Gravid', skal der være en blå linje i kontrolvinduet og et '+'-symbol i resultatvinduet inden for 10 minutter efter gennemførelse af testen.
 - Plustegnet '+' i resultatvinduet kan se forskelligt ud, men de linjer, der udgør plustegnet '+', og linjen i kontrolvinduet skal have samme bredde (se billede A-C).
- Billede A**
Der er større sandsynlighed for, at dette forekommer, når du er gravid, og du foretager testen mere end et par dage efter din udeblevne menstruation, da hCG-niveauerne er højere.
- Billede B**
Dette er ikke usædvanligt, når du er gravid, og du foretager testen på eller omkring dagen for din udeblevne menstruation, da hCG-niveauerne stadig er relativt lave.
- Billede C**
Selvom det er svagt, gælder dette stadig som et 'Gravid'-resultat.
- Hvis du stadig er i tvivl om dit resultat, bør du vente mindst 3 dage, inden du tester igen, idet du følger instruktionerne nøje.
- Hvornår kan jeg aflæse resultatet?**

Resultatet 'Gravid' kan blive vist så hurtigt som efter 1 minut, når du tester fra den dag, du ikke fik din menstruation (som er dagen efter din forventede menstruation). Sørg for, at en blå linje også er til stede i kontrolvinduet, inden du aflæser dit resultat. Du skal vente i 3 minutter for at bekræfte resultatet 'Ikke gravid'. Hvis der ikke fremkommer nogen blå linje i kontrolvinduet inden for **10 minutter**, har testen ikke fungeret (se S6).
 - Hvor lang tid varer resultatet?**

Resultatet kan aflæses efter 3 minutter og inden for 10 minutter. Eventuelle ændringer, der sker efter 10 minutter, skal du se bort fra.
 - Min test siger, jeg er 'Ikke gravid'. Hvad skal jeg gøre?**

Du er muligvis ikke gravid, eller muligvis er niveauet af graviditetshormon endnu ikke højt nok til at kunne blive påvist, eller du kan have fejlberegnet datoen for, hvornår du skulle få din menstruation.

 - Hvis du foretog testen for tidligt, skal du foretage testen igen ved den forventede menstruation.
 - Hvis din menstruation er udeblevet, skal du foretage testen igen efter 3 dages tid. Hvis testen giver resultatet 'Ikke gravid', og du stadig ikke har fået din menstruation, skal du kontakte din læge.
 - Min test siger, jeg er 'Gravid'. Hvad skal jeg gøre?**

Hvis testen viser, at du er gravid, bør du kontakte din læge, der kan vejlede dig om, hvad du bør foretage dig i det videre forløb.

 **www.clearblue.com**
Produktrådgivningen er åben alle hverdage mellem kl. 9.00-12.00. Din samtale vil blive besvaret på engelsk, og om nødvendigt via en oversætter.

80 88 60 29
Gratis opkald fra fastnet telefoner, der kan opkræves gebyr ved opkald fra mobiltelefoner. Alle opkald bliver optaget og kan monitoreres mhp. kvalitetsformål. Du bedes have produktpakningens lot-nummer klar.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger og generelle råd om graviditet, kan du besøge vores hjemmeside på: www.clearblue.com

	Producent		Genbrug ikke
	Batchkode		Medicinsk udstyr til <i>in vitro</i> -diagnosticering
	Holdbarhedsdato		Temperaturgrænse 2-30 °C

Til selvtest derhjemme.

Kun til brug ved *in vitro*-diagnosticering.

Ikke til indvendig brug.

Må ikke genbruges.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares ved 2 °C - 30 °C.

Lad den nå stuetemperatur i 30 minutter, inden testen udføres, hvis den opbevares køligt.

Brug ikke, hvis foliepakningen er beskadiget.

Må ikke bruges efter holdbarhedsdatoen.

Bortskaf med almindeligt

husholdningsaffald.



0123