

Clearblue®

Graviditetstest

Digital Ultra Tidligt



Til selvtest. Læs denne brugsanvisning nøje igennem, inden du gennemfører testen.



Test fra
6 dage
før
din udeblevne
menstruation!



Hvis du foretager
testen tidligt,
skal du bruge den
første morgenurin
Ellers kan du teste når som helst



Undlad at
drikke store
mængder væske,
inden du tager testen



Hold aldrig
prøvepinden
med spidsen
opad

1 Udfør testen

Fjern prøvepinden fra folien, tag hættten af, og brug den med det samme. **Enten** test i:



din
urinstråle

eller



dyp
hertil

en indsamlet
urinprøve

Fjern den absorberende spids fra urinen, når stoplyset BEGYNDER at blinke.

Det tager normalt ca. 5 sekunder. Lyset fortsætter med at blinke kort og slukkes derefter. Hold den absorberende spids, så spidsen peger nedad, sæt hættten tilbage på plads, og læg prøvepinden plant.

2 Vent

Smart nedtælling vises på displayet, og hvert segment vises i rækkefølge for at vise, at testen er i gang.



Hvis Smart nedtælling ikke er vist, skal du se "Testfejl".

3 Aflæs dit resultat

Smart nedtælling slutter i løbet af 1-5 minutter, og dit resultat vises på skærmen.

Gravid



Du kan være over 99 % sikker på, om du er gravid, uanset hvornår du tester.

Se spørgsmål 1 for mere information.

Ikke Gravid



Hvis du testede tidligt, kan du stadigvæk være gravid, da mængden af hormon øges hurtigt i den tidlige graviditet.

Se spørgsmål 2 for mere information.

Spørgsmål og svar

1 Mit resultat er Gravid. Hvad skal jeg gøre?

Kontakt din læge, der kan rådgive dig om, hvilke skridt du skal tage. Det er muligt at få et positivt resultat og senere finde ud af, at du ikke længere er gravid. Se spørgsmål 6. Et 'Gravid'-resultat forbliver på skærmen i op til 1 måned.

2 Mit resultat er Ikke Gravid. Hvad betyder det?

Du er muligvis ikke gravid, eller niveauet af graviditetshormon er muligvis ikke højt nok til at blive opdaget endnu. Test igen om tre dage. Hvis dette testresultat er 'Ikke Gravid', og din menstruation er forsinket, skal du kontakte din læge.

3 Hvor tidligt kan jeg teste?

Denne test kan bruges fra 6 dage før din udeblevne menstruation (5 dage før du forventer din menstruation). **Hvis dit resultat er 'Gravid', kan du være over 99 % sikker på, at du er gravid, uanset hvornår du tester.** Da hormonniveauer varierer fra kvinde til kvinde og kan være meget lave tidligt i graviditeten, kan du være gravid, men stadig få et negativt resultat. Diagrammet nedenfor viser procentdelen af graviditeter, der blev påvist i laboratorietest med tidlige graviditets-urinprøver:

Dage inden udeblevne menstruation	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Graviditeter opdaget	> 99 %	> 99 %	> 99 %	99 %	93 %	78 %

4 Hvordan fungerer Clearblue?

Testen påviser graviditetshormon hCG (humant choriongonadotropin) i urin. Testfølsomhed er 10 mIU/ml. Det er mere end 99 % præcis i laboratorietests fra den dag, du forventer din menstruation.

5 Kan medicin eller sygdomme påvirke resultatet?

Medicin, som indeholder hCG, og visse sjældne sygdomme kan forårsage falsk-positive resultater. Ektopisk og nylig graviditet, selvom graviditeten blev afbrudt, kan give misvisende resultater. Hvis du er i eller nærmer dig overgangsalderen, kan du få et falsk gravid-tilbage-resultat, selvom du ikke er gravid. Testen bør **IKKE** blive påvirket af hormonerterapi, der indeholder clomifencitrat, smertestillende medicin, alkohol, antibiotika eller p-piller. Hvis du får uventede resultater, bør du kontakte din læge.

6 Jeg fik tidligere resultatet 'Gravid', men jeg har taget testen igen og fået et negativt resultat, eller min menstruation er startet. Hvad betyder det?

Det er muligt at få et positivt resultat og senere finde ud af, at du alligevel ikke er gravid. Det kaldes "spontan abort", som desværre ikke er ualmindeligt, og påvirker omkring 1 ud af 4 graviditeter. Heldigvis kan de fleste kvinder få en sund graviditet bagefter.

Bortskaffelse af din test

Fjern batterierne inden bortskaffelse af prøvepinden. Bortskaffelse af batteri skal ske iht. den korrekte genbrugsordning. For at fjerne dem indsættes den **buede kant på høften** i siden af prøvepinden og der drejes for at åbne pinden.

Forsigtig: Batterierne må ikke skilles ad, oplades eller brændes. Bortskaf resten af pinden iht. den korrekte genbrugsordning for elektrisk udstyr. Elektrisk udstyr må ikke brændes.

! Testfejl




Kartoteksfejl

Der opstod en fejl under testen. Det kan skyldes, at:

- den absorberende spids blev ikke holdt, så den pegede nedad
- testen blev ikke lagt plant efter påføring af urin
- for meget eller for lidt urin blev påført spidsen

Test igen ved hjælp af en ny test, og følg vejledningen nøje.

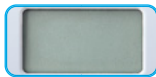

Tom fejlmeddelelse

Hvis Smart nedtælling ikke blev vist efter testen eller begyndte at køre, og skærmen derefter blev blank, skal du udføre en anden test. Test igen ved hjælp af en ny test, og følg vejledningen nøje.



www.clearblue.com

Produktrådgivningen er åben alle hverdage mellem kl. 9.00-12.00. Din samtale vil blive besvaret på engelsk, og om nødvendigt via en oversætter.

80 88 60 29 Gratis opkald.

Alle opkald bliver optaget og kan monitoreres mhp. kvalitetsformål. Venligst hav produktet og emballagen, inklusive eventuelle folieposer, ved dig, når du ringer.

Vejledningen til Clearblue Digital Ultra Tidligt med "CB15" trykt på indpakningen. Til selvtest derhjemme. Kun til brug ved *in vitro*-diagnosticering. Ikke til indvendigt brug. Må ikke genbruges. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved 2 °C - 30 °C. Lad den nå stuetemperatur i 30 minutter, inden testen udføres, hvis den opbevares køligt. Brug ikke, hvis foliepakken er beskadiget. Må ikke bruges efter holdbarhedsdatoen. Indeholder små dele. Spis ikke nogen del af denne enhed. Hvis du ved en fejltagelse sluger en del, skal du søge læge. Rapportér enhver skade forårsaget af brugen af dette produkt til Clearblue.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Schweiz.

Denne digitale IVD-enhed opfylder kravene til emissioner og immunitet i EN 61326-2-6. EMC-modforanstaltninger benyttet i det elektroniske instrument vil give rimelig beskyttelse mod elektromagnetiske interferenseffekter, som sandsynligvis forekommer i hjemmet. Følgende forebyggende advarsler gælder for udstyr, der overholder EN 61326-2-6.

a) Brug af dette instrument i et tørt miljø, særligt hvis syntetiske materialer er til stede (syntetisk tøj, tæpper osv.), kan forårsage skadelig statisk elektricitet, der kan føre til fejlagtige resultater.

b) Brug ikke dette instrument i nærheden af stærke kilder af elektromagnetisk stråling (f.eks. mobiltelefoner), da disse kan forstyrre den korrekte funktion.

	Producent		Må ikke genbruges
	Medicinsk udstyr til <i>In vitro</i> -diagnosticering		Holdbarhedsdato
	Temperaturgrænse 2-30 °C		Batchkode

Clearblue er et varemærke tilhørende SPD.
© 2021 SPD. Alle rettigheder forbeholdes.



78 % af gravid-resultater kan påvises 6 dage før din udeblevne menstruation (5 dage før du forventer din menstruation).

23000616.02 08-2021

0123